

Guante que aumenta la sensibilidad del tacto
para mejorar la autoexploración mamaria
DE VENTA EN FARMACIAS



La prevención está en tu mano

REUTILIZABLE POR TRES AÑOS



AEI 24



Kavisha Pharma

Código Nacional: 159447.1

Más información: 965 56 55 99
www.sensifemme.com

Guante de autoexploración mamaria Sensifemme:

El cáncer en cifras:

Según la OMS, el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. De los 58 millones de muertes que se registraron en el mundo en 2005, 7'6 millones (13%) se debieron al cáncer. De estos 7'6 millones, más de medio millón (502.000) fueron a causa del cáncer de mama, convirtiéndose así en el tipo de cáncer más frecuente por mortalidad del sexo femenino.

La probabilidad de curación está estrechamente vinculada a la precocidad en el diagnóstico. Por ello son cada vez más las campañas llevadas a cabo por las diferentes asociaciones y consejerías de salud, que buscan la concienciación de la población diana sobre la importancia de la detección precoz.

Mejora de la autoexploración mamaria.

El guante Sensifemme es un guante de poliuretano, inócuo y antialérgico con un aceite mineral en su interior. El aceite facilita un movimiento suave y sin fricciones a la vez que aumenta la sensibilidad del tacto permitiendo así detectar rápidamente y con mayor precisión cualquier formación desconocida.




Modo de empleo:

Su modo de empleo es muy sencillo basta con introducir la mano en el guante de forma que la cara que contiene el aceite sea la que quede sobre el pecho. Con los dedos de la mano juntos y estirados se debe recorrer toda la zona mamaria siguiendo uno de los siguientes movimientos:

Palpación en espiral

Se empieza desde la base del pecho y se asciende hacia el pezón

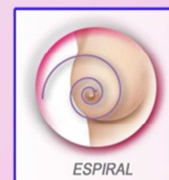


Palpación del exterior al interior.

El pecho se divide en ocho partes y se palpan todas ellas



Palpación en círculos concéntricos

Tomando como centro el pezón, se mueven los dedos en círculos concéntricos

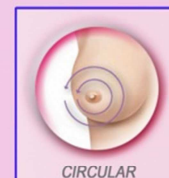

Palpación en bandas verticales

Palpa el pecho con movimientos de arriba a abajo y de abajo a arriba



Se explora la mama y la axila izquierda con la mano derecha y la mama y a axila derecha con la mano izquierda.

Si descubre cualquier anomalía, consulte inmediatamente con su especialista.